



Флекс бэриэ (Гибкий барьер)

Гиалуроновая кислота – биологическая альтернатива в стоматологии

Hyaluronic Acid -the biological power in dentistry

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Причиной образования послеоперационной адгезии является соприкосновение контактных поверхностей фиброзной ткани. Для предотвращения образования послеоперационной адгезии рекомендуется использовать продукты, которые образуют защитный барьер между тканями, и остаются на месте применения достаточно длительное время, позволяющее избежать образования адгезии. **Флекс бэриэ** – стерильный прозрачный гель высокой вязкости, который добывают из специальной гиалуроновой кислоты не животного происхождения. Благодаря высокой вязкости он отлично держится на поверхности ткани и создаёт противoadгезионную область, разделяющую соприкасающиеся участки ткани на этапе заживления после операционного вмешательства. Через две - три недели после применения продукт полностью распадается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Флекс бэриэ предназначен для предотвращения или сокращения послеоперационного образования адгезии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Откройте упаковку и возьмите шприц.
2. Снимите защитный колпачок на шприце и наденьте специальную канюлю.
3. Двигайте поршень вверх и наносите гель.

4. Обрабатываемую поверхность полностью покройте гелем. Хотя действие геля не зависит от толщины наносимого слоя, тем не менее, рекомендуется наносить его толщиной 1 - 2 мм.
5. Не промывайте водой обработанный гелем участок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Чувствительность к гиалуроновой кислоте.

Подобно другим средствам для имплантации этот продукт нельзя применять у пациентов с активной инфекцией или если участок ткани, который нужно обрабатывать, инфицирован.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре. – Не замораживать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Действие продукта подтверждено в результате - доклинических - исследований на различных животных моделях, которые приняты во всём мире. Однако доказательства его действия на человека – для чего необходимы контрольные операции, которые нельзя было провести по этическим соображениям - ещё не получены. Проведённые на сегодняшний день клинические исследования подтвердили, что у пациентов, у которых на этапе образования адгезии применялся гель гиалуроновой кислоты, не возникало каких-либо симптомов, свидетельствующих об образовании адгезии в области лечения.


УПАКОВКА

Продукт можно заказать в виде геля 1,0 мл **Флекс бэриэ** - для дентальной хирургии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BioScience GmbH
Rheinstraße 96
56235 Ransbach-Baumbach
Germany
www.bio-science.org


SYMBOLS

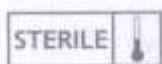

Стерилизация паром



Не использовать, если упаковка повреждена

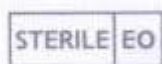

Игла стерилизована ЭО



Хранить в сухом месте




Не использовать повторно



Хранить в защищённом от солнечного света месте



См. инструкцию

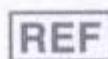

Номер заказа



Температура хранения



Использовать до



Производитель



Партия

CE 0297

Маркировка CE согласно MDD 93/42/EWG
0297 это номер „уполномоченного органа“ по
сертификации

По состоянию на: 05.2010