



naturelize

inline

RU

Для восстановления объёма и контура губ

Инструкция по использованию

Описание

Inline представляет собой прозрачный вязкий гель, который поставляется в шприце объёмом 1 мл.

Предназначен для одноразового применения. Гель состоит из поперечносшитой гиалуроновой кислоты.

Состав

1 мл inline содержит:

стабилизированной гиалуроновой кислоты 20 мг/мл
буферированного фосфатом физраствора, pH 7 q.s.

Назначение

Inline предназначен для восстановления объёма и контура губ. Гель вводится в интрадермальный слой и естественным путём приподнимает ткани.

Длительность эффекта может варьироваться и зависит от глубины и области инъекции.

Предостережение

Inline предназначен только для интрадермальных инъекций.

Интраваскулярно не вводить.

Меры предосторожности

Соблюдайте обычные меры предосторожности, предусмотренные при интрадермальных инъекциях. Как и любая другая подобная процедура, имплантация inline сопровождается ингерентным риском инфекции. Необходимо основательное изучение анатомии области, в которой производится инъекция, особая предосторожность требуется вблизи таких уязвимых структур как, напр., нервы, сосуды, внутренние органы.

У пациентов, употребляющих вещества, которые влияют на сворачиваемость крови, напр., аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты, будет, как и при любой другой инъекции, более сильный кровоподтёк или кровотечение на месте инъекции. Нельзя применять *inline* в анатомической области, расположенной в месте или вблизи места, поражённого кожным заболеванием в активной фазе, воспалением и т.п.

Нельзя вводить *inline* в область нахождения какого-либо постоянного имплантата.

Испытания *inline* на беременных или кормящих женщинах, а также на детях, не проводились.

Не подвергать место инъекции действию высоких или экстремально низких температур по крайней мере до исчезновения обычных в таких случаях отёчностей и покраснения.

Побочные явления

После инъекции *inline* в области имплантации может наблюдаться обычная в таких случаях реакция. Например, покраснение, отёчность, чувствительность, боль, гематома или зуд. Обычно они проходят в течение одной-двух недель.

Нежелательный эффект

В редких случаях сообщалось о запоздалой воспалительной реакции и таких осложнениях как отёчность и уплотнение ткани. Может появиться покраснение и чувствительность. В экстремальных случаях для эффективного устранения таких явлений достаточно кратковременного применения оральных кортикостероидных препаратов.

Дозировка и введение

Глубина инъекции и количество вводимого препарата зависит от конкретного случая и желаемого увеличения объёма. Проводите коррекцию только до 100% желаемого объёма губ. Не проводите дополнительную коррекцию.

Внимание: Шприц и все не использованные материалы утилизируются сразу после проведения процедуры.

Срок и условия хранения

Срок хранения составляет 24 мес. Хранить при температуре от 2 до 25⁰ С.





Производитель

BioScience GmbH
Rheinstraße 96
56235 Ransbach-Baumbach
Germany
www.bio-science.org

Дистрибьютор

Naturelize GmbH
Im Rott 6-10
69493 Hirschberg
Germany
www.naturelize.com

SYMBOLS

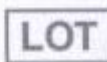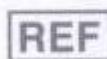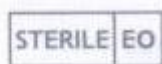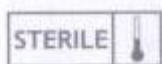

CE 0297

СИМВОЛЫ

Стерилизация паром

Не использовать, если упаковка повреждена

Игла стерилизована облучением

Хранить в сухом месте

Не использовать повторно

Хранить в защищённом от солнечных лучей месте

Использовать согласно инструкции

Номер заказа

Температура хранения

Использовать до

Производитель

Партия

Маркировка CE согласно MDD 93/42/EWG
0297 это номер „уполномоченного органа“ по
сертификации (DQS)

По состоянию на: 10.2009