



# naturelize

## maxface

## RU

Для восстановления объёма и контуров лица

### **Инструкция по использованию**

#### **Описание**

maxface представляет собой прозрачный вязкий гель, который поставляется в шприце объёмом 1 мл.

Предназначен для одноразового применения. Гель состоит из поперечносшитой гиалуроновой кислоты.

#### **Состав**

1 мл maxface содержит:

стабилизированной гиалуроновой кислоты 20 мг/мл  
буферированного фосфатом физраствора, pH 7 q.s.

#### **Назначение**

maxface предназначен для восстановления объёма и контура лица. Гель вводится в интрадермальный слой и естественным путём приподнимает ткани.

Длительность эффекта может варьироваться и зависит от глубины и области инъекции.

#### **Предостережение**

maxface предназначен только для интрадермальных инъекций. Интраваскулярно не вводить.

#### **Меры предосторожности**

Соблюдайте обычные меры предосторожности, предусмотренные при интрадермальных инъекциях. Как и любая другая подобная процедура, имплантация maxface сопровождается ингерентным риском инфекции. Необходимо основательное изучение анатомии области, в которой производится инъекция, особая предосторожность требуется вблизи таких уязвимых структур как, напр., нервы, сосуды, внутренние органы.

У пациентов, употребляющих вещества, которые влияют на сворачиваемость крови, напр., аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты, будет, как и при любой другой инъекции, более сильный кровоподтёк или кровотечение на месте инъекции.

Нельзя применять maxface в анатомической области, расположенной в месте или вблизи места, поражённого кожным заболеванием в активной фазе, воспалением и т.п.

### **Нельзя вводить maxface в область нахождения какого-либо постоянного имплантата.**

Испытания maxface на беременных или кормящих женщинах, а также на детях, не проводились.

Не подвергать место инъекции действию высоких или экстремально низких температур по крайней мере до исчезновения обычных в таких случаях отёчностей и покраснения.

### **Побочные явления**

После инъекции maxface в области имплантации может наблюдаться обычная в таких случаях реакция. Например, покраснение, отёк, чувствительность, боль, гематома или зуд. Обычно они проходят в течение одной-двух недель.

### **Нежелательный эффект**

В редких случаях сообщалось о запоздалой воспалительной реакции и таких осложнениях как отёчность и уплотнение ткани. Может появиться покраснение и чувствительность. В экстремальных случаях для эффективного устранения таких явлений достаточно кратковременного приёма оральных кортикостероидных препаратов.

### **Дозировка и введение**

Глубина инъекции и количество вводимого препарата зависит от конкретного случая и желаемого увеличения объёма. Проводите коррекцию только до 100% желаемого объёма губ. Не проводите дополнительную коррекцию.

**Внимание:** Шприц и все не использованные материалы утилизируются сразу после проведения процедуры.

### **Срок и условия хранения**

Срок хранения составляет 24 мес. Хранить при температуре от 2 до 25<sup>0</sup> С.





**Производитель**

BioScience GmbH  
Rheinstraße 96  
56235 Ransbach-Baumbach  
Germany  
[www.bio-science.org](http://www.bio-science.org)

**Дистрибьютор**

Naturelize GmbH  
Im Rott 6-10  
69493 Hirschberg  
Germany  
[www.naturelize.com](http://www.naturelize.com)

## SYMBOLS

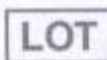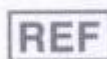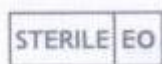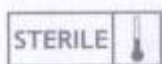

CE 0297

## СИМВОЛЫ

Стерилизация паром

Не использовать, если упаковка повреждена

Игла стерилизована облучением

Хранить в сухом месте

Не использовать повторно

Хранить в защищённом от солнечных лучей месте

Использовать согласно инструкции

Номер заказа

Температура хранения

Использовать до

Производитель

Партия

Маркировка CE согласно MDD 93/42/EWG  
0297 это номер „уполномоченного органа“ по  
сертификации (DQS)

По состоянию на: 10.2009