



naturelize

restore

RU

Для восстановления объёма и контуров поверхности тела

Инструкция по использованию

Описание

restore представляет собой прозрачный вязкий гель, который поставляется в шприце объёмом 2 мл.

Предназначен только для одноразового применения. Гель состоит из одной из форм поперечносшитой гиалуроновой кислоты.

Состав

1 мл restore содержит:

стабилизированной гиалуроновой кислоты 20 мг/мл
буферированного фосфатом физраствора, pH 7 q.s.

Назначение и применение

restore предназначен для восстановления объёма и моделирования контуров поверхности тела. Глубина инъекции может варьироваться от подкожной до супрапериостальной, в зависимости от места применения:

- ягодицы
- икры ног
- коррекция вогнутых деформаций
- область скул.

Моделирование тела с помощью restore означает, что объём ягодиц и всех других частей тела можно восстановить естественным способом, препарат restore среди прочего используется для моделирования декольте, а также как дополнительная процедура после пластической операции, например, липосакции. Гель вводится глубоко в кожу и естественным способом поднимает ткани.

Длительность эффекта может варьироваться и зависит от глубины и области инъекции.

Предостережение

restore предназначен только для подкожного или супрапериостального применения. Интраваскулярно и внутримышечно не вводить.

Меры предосторожности

Соблюдайте обычные меры предосторожности, предусмотренные при подкожных и супрапериостальных инъекциях. Как и любая другая подобная процедура, имплантация restore сопровождается ингерентным риском инфекции. Необходимо основательное изучение анатомии области, в которой производится инъекция, особая предосторожность требуется вблизи таких уязвимых структур как, напр., нервы, сосуды, внутренние органы.

У пациентов, употребляющих вещества, которые влияют на сворачиваемость крови, напр., аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты, будет, как и при любой другой инъекции, более сильный кровоподтёк или кровотечение на месте инъекции. Нельзя применять restore в анатомической области, расположенной в месте или вблизи места, поражённого кожным заболеванием в активной фазе, воспалением и т.п.

Нельзя вводить restore в область нахождения какого-либо постоянного имплантата.

Испытания restore на беременных или кормящих женщинах, а также на детях, не проводились.

Не подвергать место инъекции действию высоких или экстремально низких температур по крайней мере до исчезновения обычных в таких случаях отёчностей и покраснения.

Следует рекомендовать пациентам не напрягаться в течение нескольких недель после процедуры, в том числе избегать постоянного давления на месте инъекции.

Побочные явления

После инъекции restore в области имплантации может наблюдаться обычная в таких случаях реакция. Например, покраснение, отёчность, чувствительность, боль, гематома или зуд. Обычно они проходят сами по себе в течение одной-двух недель.

Нежелательный эффект

В редких случаях сообщалось о запоздалой воспалительной реакции и таких осложнениях как отёчность и уплотнение ткани. Может появиться покраснение и чувствительность. В экстремальных случаях для эффективного устранения таких явлений достаточно кратковременного приёма оральных кортикостероидных препаратов.

Дозировка и введение

Глубина инъекции и количество вводимого препарата зависит от конкретного случая и желаемого увеличения объёма.

Инъекцию должен производить только врач, обладающий глубокими знаниями и опытом в области трансплантации жира и подобных процедур. Проводите коррекцию только до 100% желаемого объёма. Не проводите дополнительную коррекцию.

Внимание: Шприц и все не использованные материалы утилизируются сразу после проведения процедуры.

Форма поставки

Restore поставляется в шприце объёмом 2 мл с замком Люера в блистерной упаковке. Содержимое шприца стерильно.

Срок и условия хранения

Срок хранения restore составляет 24 мес. Хранить при температуре от 2 до 25⁰ С.





Производитель

BioScience GmbH
Rheinstraße 96
56235 Ransbach-Baumbach
Germany
www.bio-science.org

Дистрибьютор

Naturelize GmbH
Im Rott 6-10
69493 Hirschberg
Germany
www.naturelize.com

SYMBOLS

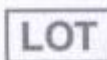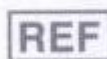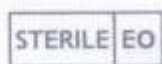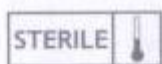

CE 0297

СИМВОЛЫ

Стерилизация паром

Не использовать, если упаковка повреждена

Игла стерилизована облучением

Хранить в сухом месте

Не использовать повторно

Хранить в защищённом от солнечных лучей месте

Использовать согласно инструкции

Номер заказа

Температура хранения

Использовать до

Производитель

Партия

Маркировка CE согласно MDD 93/42/EWG
0297 это номер „уполномоченного органа“ по
сертификации (DQS)

По состоянию на: 10.2009